

"Утверждено"
"Директор" *Мещеряков*
8.08.2020

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОБЛУЧАТЕЛЯ-РЕЦИРКУЛЯТОРА МЕДИЦИНСКОГО «Armed» СН111-130**



ПРИМЕНЕНИЕ

Применяются в помещениях для обеззараживания воздуха с целью снижения уровня бактериальной обсемененности и создания условий для предотвращения распространения возбудителей инфекционных болезней.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подключить рециркулятор к сети.
- Включить тумблер «Сеть»
- Убедиться, что лампа светится, вентилятор работает.
- Рециркулятор готов к работе.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рециркулятор должен размещаться в помещении таким образом, чтобы забор и выброс воздуха происходили беспрепятственно и совпадали с направлениями основных воздушных потоков. Рециркулятор может работать как в присутствии, так и в отсутствии людей.

Рекомендуемый объем помещений м ²	Время обработки (мин.) при эффективности
	90,0 % (IV категории – школьные классы)
от 31 до 50	30
от 51 до 75	40

ПРИКАЗ № 91

от 29.08.2020 года

О начале нового 2020-2021 учебного года.

На основании приказа управления образования администрации г.Хабаровска № 01-40/6306, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с СанПин от 30.06.2020 г №3.1/2.4.3598-20, которыми установлен порядок подготовки к открытию организаций, приказываю:

1. Организовать работу учреждения с целью минимизации контактов обучающихся по специально разработанному расписанию уроков, посещения столовой в соответствии с графиками:

- входа в учреждение
- проведения уроков
- перемен
- приема пищи.

(Графики прилагаются).

Выход обучающихся во время перемен из здания школы ЗАПРЕЩЁН!

2. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп.

3. Запретить посещение учреждения лицами, не связанными с её деятельностью (родителями/законными представителями и др.). В случае индивидуальной необходимости встреча (дата, время) с работниками школы согласовывается заранее по телефону с администрацией МБОУ СОШ № 67 с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.